


使用教程

毅意脑头环2只能通过 Neeuro 开发的应用进行配对。您可以在移动设备上打开应用商店，如 Apple App Store 或 Google Play Store，搜索 "Neeuro"，选择并下载您心仪的应用。

1 清洁毅意脑头环2

使用前先用湿毛巾或无酒精的湿纸巾，擦除毅意脑头环2传感器上残留的灰尘和污垢。

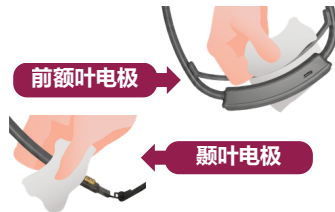


2 增强连接性

擦拭额头和双耳上方的皮肤。如果采集点有带妆容，务必把妆卸除。



3 开启蓝牙功能

确保移动设备（智能手机或平板电脑）已打开蓝牙设置。Android 用户还需确保设备已打开服务定位。

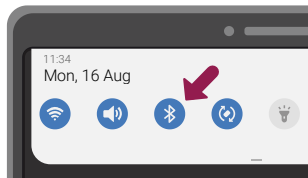

4 启动毅意脑头环2

长按电源键三秒开启头环。电源指示灯的状态及含义：

- 蓝色（默认）- 电量充足
- 绿色 - 已经与应用配对
- 红色 - 需要充电



5 佩戴毅意脑头环2

为方便佩戴头环，头发必须整齐扎起或梳理。佩戴时，确保传感器紧贴在皮肤上。另外，毅意脑头环2应该固定于眉毛上方约 2.5cm 处。



6 调整毅意脑头环2

为获得更好的贴合感和更舒适的体验，请选择合适长度的弹性绑带。如果佩戴毅意脑头环2不当，可能会导致采集数据不准确或连接不稳定。因此，请确保前额叶和颞叶传感器紧贴皮肤，没有头发夹在中间。同时，要固定毅意脑头环2在耳朵上方的位置，以确保连接稳定。



7 信号检测

毅意脑头环2佩戴完成后，即可打开您要使用的 Neeuro 应用，并前往 "SenzeBand连接" 界面进行配对。如果传感器指示灯没有全部变成绿色，请重复第6步进行调整，直到指示灯全绿为止。



包含物品



毅意脑头环2介绍



安全与注意事项

请勿在潮湿或有水的环境中使用毅意脑头环2。如果头环进水，请立即断开电源并暂停使用，直到设备完全干以后再重新启动。切勿使用吹风机等外部热源烘干头环。也不要将头环暴露在极热或极冷的环境中。如果还需其它技术协助，可通过 support@neeuro.com 向我们询问。

电源注意事项

请勿尝试自行修复或更换毅意脑头环2的电池，设备维修必须由毅意脑工程师完成。充电时请使用包装内随附的 USB-C 充电线或其它相同的第三方 USB-C 数据线为您的头环充电。

FCC 合规声明

未经 Neeuro Pte. Ltd. 明确许可擅自拆装或改装行为可能导致您对本设备的使用权限失效。

此设备符合 FCC 规则的第15部分中的规范。操作程序受限于以下两个条件：

- (1) 此设备不会造成有害干扰。
- (2) 此设备可承受各种外来干扰，包括可导致非预期操作的干扰。

FCC 放射線被ばく声明

本设备符合 FCC 针对未受控制环境所制定的辐射暴露限制。本发射器不应与其他天线或发射器一起放置或运行。

废弃电子电气设备 (WEEE) 规定

请勿将毅意脑头环2当作一般垃圾丢弃。本产品零组件设置为可回收利用。请依照您所在地区有关废弃电子产品的处理方式处理。正确处理本产品将有助于节省宝贵的资源，并防止对人类健康和环境造成任何潜在的负面影响。

保修

Neeuro Pte. Ltd. (下称“毅意脑”) 保证毅意脑头环2 (下称“头环”) 在正常使用情况下质量保修期为一年，自原购买者购买之日起有效 (下称“保修期限”)。根据本有限保修，如果毅意脑在保修期内收到有关产品的保修要求，毅意脑将自行选择在法律允许的范围内 (i) 使用全新或翻新的更换件修理头环，(ii) 将头环更换为全新的或翻新的头环，为您提供保修服务。所有被替换的头环或部件将属于 Neeuro Pte. Ltd. 的资产。

保修服务不涵盖以下范围：因意外、滥用、误用、火灾或其他天灾或由于使用不当或不合理维护保养而造成的损坏 (包括因外力受损)。

Neeuro Pte. Ltd. (Reg: 201302274H)

1 One-North Crescent,
#07-02 Razer SEA HQ,
Singapore 138538

support@neeuro.com

使用手册

