


使い方

SenzeBand 2 は、Neeuro のモバイルアプリケーションを介してのみ、モバイルデバイスに接続することができます。モバイルデバイスで、Apple App Store または Google Play Store で「Neeuro」を検索し、ご希望のアプリケーションを選択してダウンロードしてください。

1 SenzeBand 2 をきれいにする

常に濡れタオルまたはノンアルコールティッシュを使用してください。SenzeBand 2 のセンサーに影響を与える可能性のあるほこりや汚れを取り除きます。

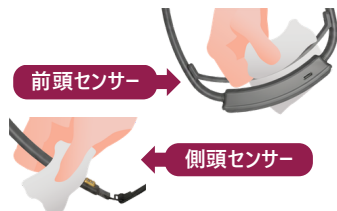


2 接続性の強化

額と両耳の上の皮膚部分を拭きます。メイクは落としてください。



3 Bluetooth をオンにする

モバイル端末で Bluetooth 機能が有効になっていることを確認してください。位置情報サービスが有効になっていることを確認します (Android デバイス)。

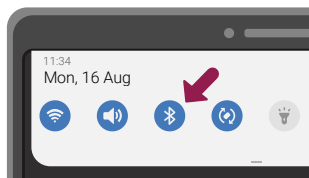

4 SenzeBand 2 をオンにする

電源ボタンを3秒間押し続けて、スイッチをオンにします。LED パワーインジケータの表示は次の通りです:

- 青 (デフォルト) - 十分なバッテリー残量があります。
- 緑色 - モバイル アプリケーションに接続されています
- 赤色 - 充電が必要です



5 SenzeBand 2 を装着する

センサーが皮膚に触れるように、髪を結んだり、調節したりする必要があります。SenzeBand 2 を眉毛の約 2.5cm 上に装着します。



6 SenzeBand 2 を調整する

より良いフィット感と快適さのために、付属の短いストラップで調整、または合ったストラップに交換する。フィットしていない SenzeBand 2 は、不正確な測定や接続が不安定になる可能性があります。前頭と側頭センサーが皮膚に直接接触していることを確認し、間に髪の毛が入らないようにします。接続をよくするために、SenzeBand 2 を耳の上にセットしてください。




7 接続の確認

SenzeBand がうまく装着できたら、希望の Neeuro アプリケーションを起動してください。次に「設定」→「デバイス」で SenzeBand を接続します。アプリケーションのセンサーインジケータが緑色になるまで、ステップ6を繰り返してください。



パッケージ明細

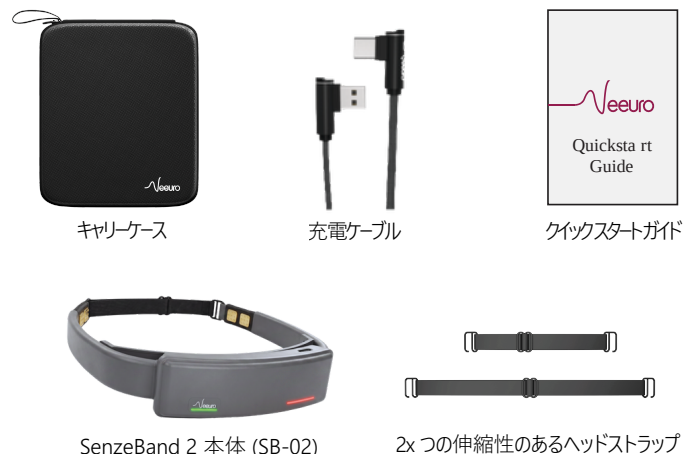

SenzeBand 2 について



安全性とコンプライアンス

濡れた状態や雨の中で SenzeBand 2 デバイスを使用しないでください。SenzeBand 2 が濡れた場合は、すべてのケーブルを抜き、デバイスの電源を切ります。SenzeBand 2 が完全に乾くのを待ってから、電源ボタンを押して SenzeBand 2 を再びオンにします。ヘアドライヤーなどの外部熱源を介して SenzeBand 2 を乾燥させようとしてください。SenzeBand 2 を極端な高温または低温にさらさないでください。さらにサポートが必要な場合は、「support@neeuro.com」までご連絡ください。

バッテリーの安全性

SenzeBand 2 の充電式バッテリーは、第三者が修理または交換しないでください。SenzeBand 2 はパッケージに含まれているような USB-C ケーブルを使用して充電してください。

FCC の注意

コンプライアンスの責任を負う当事者によって明示的に承認されていない変更または修正を行うと、機器を操作するユーザーの権限が無効になる場合があります。

このデバイスは、FCC 規則のパート 15 に準拠しています。操作には、次の 2 つの条件があります。(1) このデバイスは有害な干渉を引き起こさないこと。(2) このデバイスは、望ましくない操作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信した干渉を受け入れる必要があります。

FCC 放射線被ばく声明

この装置は、制御されていない環境に対して定められた FCC 放射線被曝制限に準拠しています。

この送信機は、望ましくない操作を引き起こす可能性のある他のアンテナまたは送信機と同じ場所に配置したり、一緒に操作したりしないでください。

WEEE コンプライアンス

SenzeBand 2 は、通常の家庭ごみと一緒に廃棄してはいけません。SenzeBand 2 は、電気廃棄物および電子機器のリサイクルのために指定された収集場所に廃棄する必要があります。廃棄時に SenzeBand 2 を分離してリサイクルすることで、天然資源を保護し、人の健康と環境を保護する方法で機器をリサイクルすることができます。

保証情報

SenzeBand 2 の保証は、Neeuro Pte. Ltd. によって提供されます。それは、最初の購入の日から1年間、通常の消費者としての使用の下での材料および製造上の欠陥に対して SenzeBand 2 を保証します。この保証期間中に、SenzeBand 2 に欠陥が発生した場合、Neeuro Pte. Ltd. は、法律で許可されている範囲で、

(i) 新品または再生部品を使用して SenzeBand 2 を修理するか、(ii) SenzeBand 2 を交換するか、または SenzeBand 2 と同等の新品または再生 SenzeBand 2 と交換します。交換されたすべての部品または返品された SenzeBand 2 は、Neeuro Pte. Ltd. の所有物となります。この限定保証は、事故、誤用、怠慢、火災またはその他の外的要因、改造、修理、または商用利用の対象とならない SenzeBand 2 のハードウェアコンポーネントにのみ適用されます。

Neeuro Pte. Ltd. (Reg: 201302274H)

1 One-North Crescent,
#07-02 Razer SEA HQ,
Singapore 138538

support@neeuro.com

ユーザガイド

