


使用教程


1 清理毅意脑头环2

每次使用前用湿巾擦除传感器上残留的灰尘和污垢。这会有效提高信号的稳定性和可靠性。

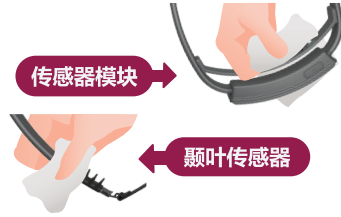


2 提高信号稳定性

也建议使用不含酒精的湿巾擦拭额头以及耳朵上方(率谷)的皮肤。

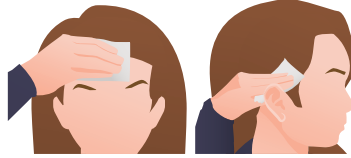

3 开启蓝牙

确保移动设备(智能手机或平板电脑)已开启蓝牙功能。如果还没,请在移动设备上打开“设置”,找到“蓝牙”选项并开启。

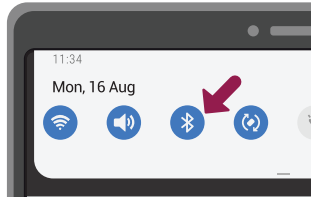

4 启动毅意脑头环2

长按电源键长达三秒开启毅意脑头环2。开机成功后,电源指示灯会显示头环的电量。在电量充足时启动,指示灯会显示为蓝色,然后连接应用后转绿色。然而在电量不足时启动,指示灯会显示为红色,连接应用后持续显示为红色。




5 连接设备

毅意脑头环2只能通过毅意脑开发的应用与移动设备连接。在应用商店 Apple App Store或Google Play Store上搜索“Neeuro”并选择心仪的应用后下载。在应用上,打开设置 > 设备 > 添加设备,之后跟着应用上的说明连接自己的毅意脑头环2。




6 佩戴毅意脑头环2

把毅意脑头环2放置在眉毛一英寸以上的位置。调整设备头带,以适应自己的头围。如果没佩戴好头环可能导致检测的信号不可靠或是信号不稳定。

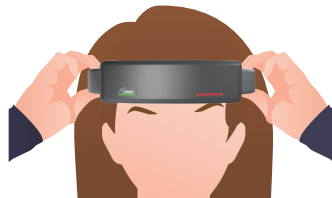

7 调整毅意脑头环2

为了得到稳定的信号,请让传感器紧贴皮肤上,尽量避免与头发的接触。

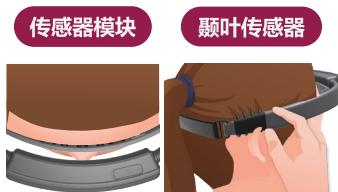

8 检查连接信号

在应用上打开设置 > 设备,重复步骤7进行调整直到应用上显示稳定的EEG指示灯(全绿)。



包含物品



收纳盒

充电线

快速入门指南



毅意脑头环2 (SB-02)



2x 设备头带

毅意脑头环2介绍



重要安全与处理事项

请勿在潮湿或有水的环境使用毅意脑头环2。如果头环进水,立即断开电源并暂停使用,直到它完全干后再重新启动。切勿使用吹风机等外部热源烘干头环。也不要将头环暴露在极热或极冷的温度下。如果还需其它技术协助,可通过support@neuro.com向我们询问。

电源注意事项

请勿尝试自行修复或更换毅意脑头环2的电池,维修必须由毅意脑的工程师完成。充电时请使用包装里随附的USB-C充电线或其它相同的第三方USB-C数据线为您的头环充电。

FCC合规声明

未经Neeuro Pte. Ltd.明确许可擅自更改或改装行为可能导致您对本设备的使用权限失效。

这个设备遵照FCC规制第15节,操作程序受限于以下两个条件:

- (1) 这个设备不得造成有害干扰。
- (2) 这个设备必须可接受各种干扰,包括可导致非预期操作的干扰。

FCC辐射暴露声明

本设备符合FCC针对未受控制环境所制定的辐射暴露限制。本发射器不应与其他天线或发射器一起放置或运行。

废弃电器电子设备 (WEEE)

请勿将毅意脑头环2当作一般垃圾丢弃。本产品零组件设置为可回收利用。请依照您所在地区有关废弃电子产品的处理方式处理。正确处理本产品将有助于节省宝贵的资源,并防止对人类健康和环境造成任何潜在负面影响。

保修

Neeuro Pte. Ltd.(下称“毅意脑”)保证毅意脑头环2(下称“头环”)在正常使用情况下不会出现材料和工艺缺陷一年,自原购买者购买之日起有效(下称“保修期限”)。根据本有限保修,如果毅意脑在保修期内收到有关产品的缺陷和有效索赔,则毅意脑将自行选择并在法律允许的范围内 (i) 使用新或翻新的更换件修理头环, (ii) 将头环更换为新的或翻新的头环,为您提供保修服务。所有被替换的头环或部件将属于Neeuro Pte. Ltd.的资产。

保修服务不涵盖以下范围:因意外、滥用、误用、火灾或其他天灾或由于使用不当或不合理维护保养而造成的损坏(包括因外力受损)。

Neeuro Pte. Ltd. (Reg: 201302274H)

100H Pasir Panjang Road,
#04-03 OC@Pasir Panjang
Singapore 118524

support@neuro.com

使用手册

