


使用教程


1 清理毅意腦頭環2

每次使用前用濕巾擦除傳感器上殘留的灰塵和污垢。這會有效提高信號的穩定性和可靠性。

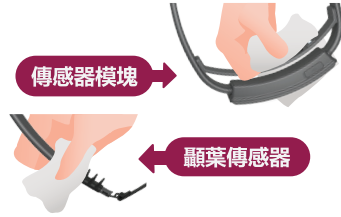


2 提高信號穩定性

也建議使用不含酒精的濕巾擦拭額頭以及耳朵上方(率谷)的皮膚。

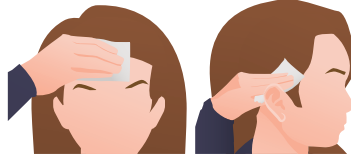

3 開啟藍牙

確保移動設備(智能手機或平板電腦)已開啟藍牙功能。如果還沒,請在移動設備上打開“設置”,找到“藍牙”選項並開啟。

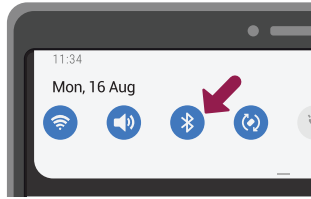

4 啟動毅意腦頭環2

長按電源鍵長達三秒開啟毅意腦頭環2。開機成功後,電源指示燈會顯示頭環的電量。在電量充足時啟動,指示燈會顯示為藍色,然後連接應用後轉綠色。然而在電量不足時啟動,指示燈會顯示為紅色,連接應用後持續顯示為紅色。




5 連接設備

毅意腦頭環2只能通過毅意腦開發的應用與移動設備連接。在應用商店Apple App Store或Google Play Store上搜索“Neuro”並選擇心儀的應用後下載。在應用上,打開設置 > 設備 > 添加設備,之後跟著應用上的說明連接自己的毅意腦頭環2。




6 佩戴毅意腦頭環2

把毅意腦頭環2放置在眉毛一英寸以上的位置。調整設備頭帶,以適應自己的頭圍。如果沒佩戴好頭環可能導致檢測的信號不可靠或是信號不穩定。

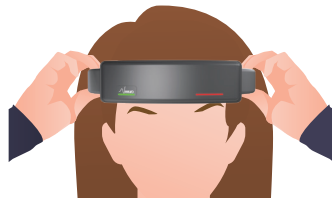

7 調整毅意腦頭環2

為了得到穩定的信號,請讓傳感器緊貼皮膚上,盡量避開與頭髮的接觸。

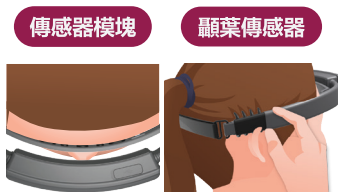

8 檢查連接信號

在應用上打開設置 > 設備,重複步驟7進行調整直到應用上顯示穩定的EEG指示燈(全綠)。



包含物品



收納盒

充電線

快速入門指南



毅意腦頭環2 (SB-02)



2x 設備頭帶

毅意腦頭環2介紹



重要安全與處理事項

請勿在潮濕或有水的環境使用毅意腦頭環2。如果頭環進水,立即斷開電源並暫停使用,直到它完全乾後再重新啟動。切勿使用吹風機等外部熱源烘乾頭環。也不要將頭環暴露在極熱或極冷的溫度下。如果還需其它技術協助,可通過support@neuro.com向我們詢問。

電源注意事項

請勿嘗試自行修復或更換毅意腦頭環2的電池,維修必須由毅意腦的工程師完成。充電時請使用包裝裡隨附的USB-C充電線或其它相同的第三方USB-C數據線為您的頭環充電。

FCC合規聲明

未經Neuro Pte. Ltd.明確許可擅自更改或改裝行為可能導致您對本設備的使用權限失效。

這個設備遵照FCC規制第15節,操作程序受限於以下兩個條件:

- (1) 這個設備不得造成有害干擾。
- (2) 這個設備必須可接受各種干擾,包括可導致非預期操作的干擾。

FCC輻射暴露聲明

本設備符合FCC針對未受控制環境所製定的輻射暴露限制。本發射器不應與其他天線或發射器一起放置或運行。

廢棄電器電子設備 (WEEE)

請勿將毅意腦頭環2當作一般垃圾丟棄。本產品零組件設置為可回收利用。請依照您所在地區有關廢棄電子產品的處理方式處理。正確處理本產品將有助於節省寶貴的資源,並防止對人類健康和環境造成任何潛在負面影響。

保修

Neuro Pte. Ltd.(下稱“毅意腦”)保證毅意腦頭環2(下稱“頭環”)在正常使用情況下不會出現材料和工藝缺陷一年,自原購買者購買之日起有效(下稱“保修期限”)。根據本有限保修,如果毅意腦在保修期內收到有關產品的缺陷和有效索賠,則毅意腦將自行選者並在法律允許的範圍內(i)使用新或翻新的更換件修理頭環,(ii)將頭環更換為新的或翻新的頭環,為您提供保修服務。所有被替換的頭環或部件將屬於Neuro Pte. Ltd.的資產。

保修服務不涵蓋以下範圍:因意外、濫用、誤用、火災或其他天災或由於使用不當或不合理維護保養而造成的損壞(包括因外力受損)。

Neuro Pte. Ltd. (Reg: 201302274H)

100H Pasir Panjang Road,
#04-03 OC@Pasir Panjang
Singapore 118524

support@neuro.com

使用手冊

